



## DecaWIPES XL N Desinfektionstücher alkoholfrei

Biozid & Medizinprodukt IIa

### Vorteile

- Alkoholfrei
- Aldehydfrei, Phenolfrei
- Bakterizid, levurozid, begrenzt viruzid
- Schnell wirksam (1 Min.)
- Fusselfreies Vlies
- Hohe Reinigungsleistung
- Umwelt- und materialschonend (pH-neutral)
- Ausgezeichnete Materialverträglichkeit
- Praktische Tuchgröße und hohe Reichweite
- Ohne klebrige Rückstände

VAH

IHO



### Anwendungsgebiete

- Schnelle Desinfektion und Reinigung von medizinischem Inventar
- Besonders für alkoholempfindliche Medizinprodukte (z.B. Ultraschallköpfe von Sonden ohne Schleimhautkontakt)

Die PuraDES Desinfektionstücher DecaWIPES XL N sind gebrauchsfertige, vorgetränkte Tücher zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholempfindlichen Oberflächen aller Art. Insbesondere für die Desinfektion von empfindlichen Arbeitsflächen in medizinischen Einrichtungen, Rettungswagen sowie in Alten- und Pflegeheimen oder medizinischen Laboren geeignet.

### Zusammensetzung

In 100 g Tränkflüssigkeit DecaBAC N sind enthalten:  
0,24g Benzyl-C12-16-alkyldimethylammoniumchlorid,  
0,24g N,N-Didecyl-N,N-dimethylammoniumchlorid,  
0,24g C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchlorid

### Anwendungshinweise

Den Beutel mit den getränkten Tüchern oben öffnen und in den dafür vorgesehenen Entnahmeeimer stellen. Das Tuch in der Mitte der Vliesrolle anziehen und von unten durch den Stern im Deckelverschluss fädeln. Danach den Deckel fest auf den Behälter drücken und dicht verschließen. Die zu desinfizierenden Flächen sorgfältig abwischen und das Desinfektionsmittel einwirken lassen. Vor großflächigen Anwendungen auf empfindlichen Materialien wie Kunstleder erst an einer kleinen verdeckten Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Um Schlierenbildung zu vermeiden, sollten die behandelten Flächen in regelmäßigen Abständen mit einem feuchten (Wasser) Einmaltuch nachgewischt werden. Oberflächen aus Polycarbonat sollten nicht desinfiziert werden. Nach Entnahme eines Tuches ist der Behälter wieder sorgfältig und dicht zu verschließen.

Die Tücher sind nach dem Öffnen des Beutels nur für 28 Tage im dazugehörigen Entnahmeeimer verwendbar.

Das Stick- & Liftetikett wird vom Beutel abgezogen, auf den Entnahmeeimer aufgeklebt und das Haltbarkeitsdatum etc. händisch eingetragen. Bei der Anwendung sind geeignete Handschuhe (z.B. aus Nitrilkauschuk) zu tragen.

Wirksamkeiten und Prüfmethoden		Belastung	1 Min.	2 Min.	30 Min.
<b>Bakterien und Pilze</b>					
Anwendungsempfehlung zur Flächendesinfektion (bakterizid, levurozid) – medical*	VAH/EN16615	hohe Belastung		●	
bakterizid, levurozid - Lebensmittel, Industrie, Haushalt, öffentliche Einrichtungen	EN 13697 EN 1650 EN 1276	hohe Belastung	●		
<b>behüllte und unbehüllte Viren</b>					
wirksam gegen alle behüllte Viren**	RKI/DW		●		
wirksam gegen Noro-Viren (MNV)	EN 14476	niedrige Belastung			●
wirksam gegen Rota-Viren	EN 14476	niedrige Belastung	●		

\* einschließlich Phase 2/Stufe 1 - und Phase 2/ Stufe 2 Tests (quantitative Suspensionsversuche und praxisnahe Versuche)

\*\* gemäß RKI/DW Prüfviren BVDV und Vaccinia Virus, erlaubt den Rückschluss auf alle anderen behüllten Viren inkl HIV, HBV, HCV



## DecaWIPES XL N

### Desinfektionstücher alkoholfrei

Biozid & Medizinprodukt IIa

VAH

IHO



### Sonstige Hinweise


Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen.

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.


Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

BAuA-Nr.: N-74780

HPN-Nr.: 54.99.02.0002

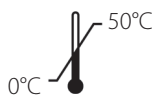

pH-Wert: 7,2

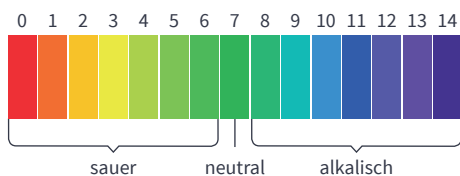

Reichweite pro Tuch



### Erhältlich als

Gebinde	Inhalt	Material	Größe	Art.Nr.	Stück pro Karton
Nachfüllbeutel	150 Tücher	PES/VIS 50 g/m <sup>2</sup>	20 x 30 cm	Pura122	2