



DecaWIPES XL N

Lingettes désinfectantes sans alcool

Biocide & Dispositif médical IIa

Avantages

- sans alcool
- sans aldéhyde, sans phénol
- bactéricide, levuricide, virucide limité
- efficacité rapide (1 min.)
- tissu non tissé ne peluchant pas
- puissance de nettoyage élevée
- préserve l'environnement et les matériaux (pH neutre)
- excellente tolérance des matériaux
- taille de lingettes pratique et portée supérieure
- ne laisse pas de résidus collants

VAH

IHO



Domaines d'application

- Pour la désinfection et le nettoyage rapides de votre inventaire médical
- Convient tout particulièrement aux dispositifs médicaux sensibles à l'alcool (p. ex. sondes d'échographie sans contact avec les muqueuses)

Les lingettes désinfectantes DecaWIPES XL N de PuraDES sont prêtes à l'emploi, imprégnées de solution désinfectante pour la désinfection rapide et le nettoyage de surfaces en tout genre ne pouvant être traitées à l'alcool. Conviennent en particulier pour la désinfection de surfaces de travail sensibles dans les établissements médicaux, les ambulances, les établissements médico-sociaux ou des laboratoires médicaux.

Composition

100 g de liquide d'imprégnation DecaBAC N contiennent :
 0,24 g de chlorure d'alkyldiméthylbenzylammonium benzylalkyl en C12-C16,
 0,24 g de N,N-Didecyl-N,N-chlorure de diméthylammonium,
 0,24 g de C12-14-Alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethylammoniumchlorid

Mode d'emploi

Ouvrir le haut du sachet de lingettes imprégnées et le placer dans le dévidoir distributeur prévu à cet effet. Tirer sur la lingette au milieu du rouleau et la faire passer par l'ouverture du couvercle en étoile par en-dessous. Puis appuyer fermement sur le couvercle pour bien le refermer hermétiquement. Frotter minutieusement les surfaces à désinfecter et laisser agir le produit. Avant toute application sur de grandes surfaces en matériaux sensibles comme le similicuir, tester d'abord le produit sur une petite zone non visible. Afin d'éviter la formation de stries, il est recommandé d'essuyer les surfaces traitées à intervalle régulier à l'aide d'un chiffon humide (eau) à usage unique. Les surfaces en polycarbonate ne doivent pas être désinfectées. Une fois la lingette retirée, le contenant doit être refermé soigneusement et hermétiquement.

Après ouverture du sachet, les lingettes peuvent seulement être utilisées pendant 28 jours dans le dévidoir correspondant.

Retirer l'étiquette repositionnable du sachet, l'apposer sur le dévidoir distributeur et noter la date de péremption etc. à la main. Prière de porter des gants adaptés lors de l'application (p. ex. en caoutchouc nitrile).

Efficacité et méthodes de contrôle		Charge	1 min.	2 min.	30 min.
Bactéries et champignons					
Recommandation d'utilisation pour la désinfection de surfaces (bactéricide, levuricide) – domaine médical*	VAH/EN16615	charge élevée		●	
bactéricide, levuricide - domaine alimentaire, industrie, ménage, institutions publiques	EN 13697 EN 1650 EN 1276	charge élevée	●		
virus enveloppés et non enveloppés					
efficace contre tous les virus enveloppés**	RKI/DVV		●		
efficace contre les norovirus (MNV)	EN 14476	faible charge			●
efficace contre les rotavirus	EN 14476	faible charge	●		

* y compris tests phase 2/ niveau 1 - et phase 2/ niveau 2 (essais quantitatifs de suspension et essais pratiques)

** conformément à RKI/DVV, virus de contrôle BVDV et virus vaccinal, permet de tirer des conclusions sur tous les autres virus enveloppés y compris le VIH, VHB, VHC



DecaWIPES XL N

Lingettes désinfectantes sans alcool

Biocide & Dispositif médical IIa

VAH

IHO



Autres remarques

L'emballage doit être entièrement vidé avant d'être rapporté au centre de collecte. Éliminer les résidus de produit conformément au code EAK 07 06 99.

Ce produit est destiné à un usage professionnel. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité ou l'étiquette du produit.


Utiliser les produits désinfectants avec précaution. Toujours lire attentivement l'étiquette et les informations produits avant utilisation.

BAuA-N° : N-74780

HPN-N° : 54.99/02.0002



pH : 7,2

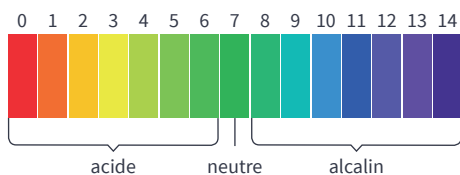

Disponible sous forme de

Contenant	Contenu	Matériau	Taille	N° d'art.	Unité par carton
Recharge	150 lingettes	PES/VIS 50 g/m ²	20 x 30 cm	Pura122	2