



HeptaPURE KONZ

Désinfection des instruments en concentré

Dispositif médical IIa

Avantages

- virucide (y compris norovirus, adénovirus, poliovirus)
- bactéricide, levuricide, tuberculocide, fongicide
- sans aldéhyde
- très bonne puissance de nettoyage
- pas de fixation des protéines
- excellente tolérance des matériaux
- non corrosif, n'agresse pas les surfaces des instruments

VAH

IHO



Domaines d'application

- Pour le nettoyage manuel suivi d'une désinfection des instruments dans tous les domaines.

HeptaPURE KONZ est un concentré liquide pour le nettoyage manuel régulier suivi de la désinfection des instruments médicaux et chirurgicaux invasifs et non invasifs, dans des bains d'immersion. Offre un spectre d'efficacité complet contre les bactéries, les levures et les virus même à faible concentration. Son parfum décent permet une préparation des instruments agréable pour l'utilisateur. Le flacon doseur pratique permet de doser le concentré en toute facilité et évite les erreurs de dosage.

Mode d'emploi

Diluer le concentré avec de l'eau et plonger les instruments ouverts immédiatement après utilisation dans la solution (diluée). Toutes les surfaces et cavités à désinfecter doivent être complètement immergées dans la solution. Selon le degré de salissure, la solution doit être changée au moins une fois par jour (d'utilisation). Une fois la désinfection terminée, l'instrument doit être soigneusement rincé à l'eau claire et séché. Il est recommandé de procéder à un rinçage final à l'eau déminéralisée. Ne pas mélanger à d'autres produits détergents ou solutions désinfectantes.

Effacité et méthodes de contrôle		Charge	15 min.	60 min.
Bactéries et champignons				
Recommandation d'utilisation pour la désinfection de surfaces (bactéricide, levuricide)*	VAH	charge élevée	2 %	1 %
tuberculocide (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	faible charge	2 %	1 %
tuberculocide (<i>M. terrae</i>)	EN 14563	faible charge	2 %	1 %
fongicide (<i>A. brasiliensis</i>)	EN 13624/EN14562	faible charge		5 %
virus enveloppés				
efficace contre tous les virus enveloppés**	RKI/DVV		2 %	1 %
virus non enveloppés				
efficace contre les norovirus (MNV)	EN 14476	faible charge		5 %
efficace contre les rotavirus	EN 14476	faible charge		5 %
efficace contre les adénovirus	EN 14476	faible charge		5 %

* y compris tests phase 2/ niveau 1 - et phase 2/ niveau 2 (essais quantitatifs de suspension et essais pratiques)

** conformément à RKI/DVV, virus de contrôle BVDV et virus vaccinal de la souche Elstree, permet de tirer des conclusions sur tous les autres virus enveloppés y compris le VIH, VHB, VHC



HeptaPURE KONZ

Désinfection des instruments en concentré

Dispositif médical IIa


VAH

IHO




Autres remarques

Ce produit est destiné à un usage professionnel. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité ou l'étiquette du produit.

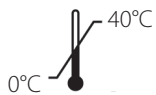

pH : > 11

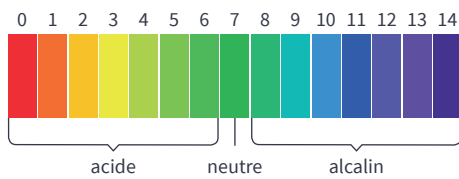

Disponible sous forme de

Contenant	Contenu	N° d'art.	IGEFA N° d'art.	Unité par carton
Flacon doseur	1000 ml	Pura540	2157800	9
Bidon	5 l	Pura541	2157801	