



PentaCID KONZ

Désinfection de surfaces en concentré

Biocide & Dispositif médical IIb

Avantages

- action virucide limitée (y compris norovirus, rotavirus)
- sans aldéhyde, sans phénol
- bonne puissance de nettoyage et bonne tolérance des matériaux
- bonne efficacité à très faible concentration (convient aux systèmes de dosage)
- ne laisse pas de résidus collants

VAH

IHO



Domaines d'application

- Pour le nettoyage régulier et la désinfection des sols, autres surfaces et objets du domaine institutionnel.

PentaCID KONZ est un concentré pour le nettoyage et la désinfection de surfaces en tout genre pour une utilisation en cabinets, établissements médico-sociaux et hôpitaux. Sa formule douce a un agréable parfum d'agrumes. Le flacon doseur pratique permet de doser le concentré en toute facilité et évite les erreurs de dosage.

Composition

100 g de solution contiennent : 10,8 g de chlorure de didécyl-diméthylammonium, 6,0 g N-(3-Aminopropyl)-N-dodécyl-propan-1,3-diamin.

Mode d'emploi

Le concentré de la solution désinfectante doit d'abord être dilué avec de l'eau du robinet avant utilisation. Ne pas mélanger à d'autres produits détergents ou solutions désinfectantes ! Avant toute application sur de grandes surfaces en matériaux sensibles comme le similicuir, tester d'abord le produit sur une petite zone non visible. Afin d'éviter la formation de stries, il est recommandé d'essuyer les surfaces traitées à intervalle régulier à l'aide d'un chiffon humide (eau) à usage unique.

Efficacité et méthodes de contrôle		Charge	15 min.	60 min.
Bactéries et champignons				
Recommandation d'utilisation pour la désinfection de surfaces (bactéricide, levuricide)*	VAH mécaniquement/ EN 16615	charge élevée	0,5 %	
tuberculocide (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	faible charge	2 %	0,5 %
tuberculocide (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	charge élevée		1 %
virus enveloppés				
efficace contre tous les virus enveloppés**	RKI/DW		0,5 %	
virus non enveloppés				
efficace contre les norovirus (MNV)	EN 14476	charge élevée	1,5 %	1 %
efficace contre les rotavirus	EN 14476	faible charge	0,5 %	
efficace contre les polyomavirus (SV 40)	EN 14476	charge élevée	1 %	

* y compris tests phase 2/ niveau 1 - et phase 2/ niveau 2 (essais quantitatifs de suspension et essais pratiques)

** conformément à RKI/DW, virus de contrôle BVDV et virus vaccinal de la souche Elstree, permet de tirer des conclusions sur tous les autres virus enveloppés y compris le VIH, VHB, VHC



PentaCID KONZ

Désinfection de surfaces en concentré

Biocide & Dispositif médical IIb

VAH

IHO



Autres remarques


L'emballage doit être entièrement vidé avant d'être rapporté au centre de collecte. Éliminer les résidus de produit conformément au code EAK 07 06 01.

Ce produit est destiné à un usage professionnel. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité ou l'étiquette du produit.


Utiliser les produits désinfectants avec précaution. Toujours lire attentivement l'étiquette et les informations produits avant utilisation.

BAuA-N° : N-74250

HPN-N° : 54.99/02.0002

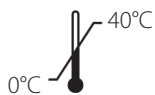

pH : > 11

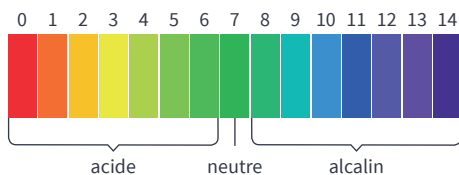

Disponible sous forme de

Contenant	Contenu	N° d'art.	Unité par carton
Flacon doseur	1000 ml	Pura520	9
Bidon	5 l	Pura521	
IBC	1.000 l	Pura523	