



## PentaPURE KONZ

### Steckbeckenreiniger Konzentrat

Medizinprodukt I

#### Vorteile

- 3 in 1 (Reiniger, Klarspülmittel und Entkalker)
- Schaumarm
- Fleckenfreie Trocknung
- Verhindert Kalkablagerungen im Dampferzeuger und auf dem Spülgut
- Niedrige Einsatzkonzentration

#### Anwendungsgebiete

- Für die 3 in 1 Anwendung in Steckbeckenreinigungsautomaten und für die Reinigung von Masken oder (Baby-)Flaschen

PentaPURE KONZ reinigt intensiv und löst zuverlässig Rückstände. Es ist bei allen Wasserhärten einsetzbar und besitzt trotz niedriger Einsatzkonzentration eine hohe Schmutzlösekraft.

#### Anwendungshinweise

PentaPURE KONZ wird entsprechend den Empfehlungen der Gerätehersteller an die Dosierpumpe angeschlossen. Die Dosiermenge ist vorwiegend von der Wasserqualität abhängig. Weiches Wasser (bis 7°dH): 1,0ml/ltr: Mittleres Wasser (7°dH - 15°dH): 1,5ml/ltr hartes Wasser (>15°dH): 2,0ml/ltr: Einsatztemperatur: 30-90°C Einwirkzeit: 1-5min.

Nicht für Steckbeckengeräte mit Kupfer oder Gusseisen verwendbar. Die Verwendung von enthärtetem Wasser verbessert die Produkteigenschaften und reduziert zugleich den Verbrauch.



#### Erhältlich als

Gebinde	Inhalt	Art.Nr.
Kanister	5 l	Pura530

#### Sonstige Hinweise

Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen Vorschriften.

VO 648/2004/EG: Enthält 5-15% nichtionische Tenside und anionische Tenside, <5 % Phosphonate

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.

#### pH-Wert: <2

