



DecaBAC S

Schnelldesinfektion alkoholisch

Biozid & Medizinprodukt IIa

Vorteile

- Hervorragende Materialverträglichkeit z.B. bei Tablets, Acrylglas oder empfindlichem Kunstleder !
- stark reduzierter Alkoholanteil bei Top Wirksamkeit
- dermatologisch mit Ergebnis sehr gut getestet
- von Experten empfohlen !
- Gute Materialverträglichkeit
- Hinterlässt keine sichtbaren Rückstände
- Wirtschaftlich im Einsatz
- Auch als Tränkflüssigkeit für DecaWIPES DRY



VAH

IHO

Anwendungsgebiete

- Als Medizinprodukt: Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur prophylaktischen Oberflächendesinfektion von nichtinvasiven Medizinprodukten im medizinischen Bereich.
- Als Biozidprodukt: Gebrauchsfertige Schnelldesinfektion zur Desinfektion von kleineren Flächen.

DecaBAC S ist eine gebrauchsfertige, aldehyd-, phenol- und QAV-freie Schnelldesinfektionen für kleine Flächen und alkoholbeständige Medizinprodukte, insbesondere für unzugängliche Flächen geeignet.

Zusammensetzung

100 g enthalten: 20,0g 1-Propanol; 5,0g 2-Propanol

Anwendungshinweise

Zur Wischdesinfektion ein geeignetes Tuch mit der Desinfektionslösung sehr gut benetzen und die Flächen abwischen, bzw. die Lösung direkt auf die Fläche geben und danach wischen. Alle zu desinfizierenden Flächen müssen vollständig feucht und benetzt sein. Das Präparat gemäß angegebener Einwirkzeiten einwirken lassen. Auch zum Tränken von kompatiblen und mit der Wischdesinfektion geprüften Tücherrollen geeignet. Es ist in diesem Anwendungsfall die geforderte Tränkmenge des jeweiligen Tuchmaterials zu beachten.

Sehr gute Materialverträglichkeit auch gegenüber sonst alkoholunverträglichen Materialien. Geeignet für den medizinischen Bereich ((zahn) ärztliche Praxen, Kliniken, Altenheime, Pflege- und Rettungsdienste) und die Bereiche Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen.

Wirksamkeiten und Prüfmethode		Belastung	30 Sek.	1 Min.	2 Min.
Bakterien und Pilze					
Bakterizid	EN 13727, EN 1276, EN 13697, EN 16615, VAH	hohe Belastung		●	
Candida albicans	EN 13624, EN 1650, EN 13697, EN 16615, VAH	hohe Belastung		●	
TbB (Tuberkulose)-Erreger (<i>M. terrae</i>)	EN 14348	hohe Belastung		●	
Mycobakterien (<i>M. avium</i>)	EN 14348	hohe Belastung		●	
„Begrent viruzid Plus“ (behüllte Viren wie z. Bsp. HBV, HIV, HCV und Noro-, Aeno und Rota-Viren)	EN 14476	hohe Belastung		●	
Polyoma SV 40	RKI/DW	hohe Belastung		●	



DecaBAC S

Schnelldesinfektion alkoholisch

Biozid & Medizinprodukt IIa

VAH

IHO

Sonstige Hinweise

Verpackung nur vollständig restentleert der Wertstoffsammlung zuführen. Füllgutreste unter EAK 07 06 99 entsorgen.

Dieses Produkt ist für den professionellen Gebrauch bestimmt. Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt oder dem Produktetikett.


Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.

Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind vom Anwender/ vom Patienten dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem der Anwender/ Patient niedergelassen ist, zu melden.


DecaBAC S – BAuA-Nr.: N-74252

DecaBAC A – BAuA-Nr.: N-74253

HPN-Nr.: 54.99.02.0002

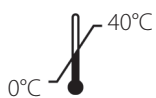

pH-Wert: < 10

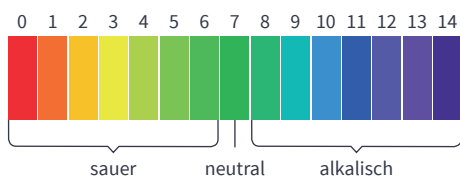

Erhältlich als

Gebinde	Inhalt	Art.Nr.	Stück pro Karton
Spenderflasche	500 ml	Pura099	12
Keulenflasche	1.000 ml	Pura101	8
Kanister	5 l	Pura102	