



## DecaWIPES DRY Desinfektionstücher trocken

### Vorteile

- Große Tücher (20 x 30 cm)
- Für alle PuraDES Tränkflüssigkeiten
- Fusselfreies Vlies
- Einfaches Stick & Lift Etikett
- 150 Tücher pro Rolle
- 50 g hochwertige Vliesqualität
- Einfache Tränkung im Spendereimer
- Optimale Abgabe der Lösung auf die Fläche
- Einhandbedienung aus dem Spendereimer
- Optimales Verhältnis von Tränkflüssigkeit zu Tuch

### Anwendungsgebiete nach Tränkung

- Prophylaktische Oberflächendesinfektion von Medizinprodukten
- Desinfektion von kleinen Flächen


Die PuraDES Desinfektionstücher DecaWIPES DRY sind trockene Vlies-tücher zur Flächendesinfektion. Getränkt mit den PuraDES-Desinfektionsmitteln eignen sie sich besonders zur schnellen und unkomplizierten Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und Oberflächen in medizinischen Bereichen. Die fusselfreien, hochwertigen Vliestücher geben die Desinfektionslösung hervorragend ab und gewährleisten eine optimale Benetzung der zu desinfizierenden Fläche

Mit dem beigelegten, innovativen Lift & Stick Etikett haben Sie alle gesetzlich notwendigen Angaben (Einwirkzeiten, Gefahrenhinweise etc.) nach der Tränkung der Tücher einfach und unkompliziert auf dem Spendereimer sichtbar aufgebracht. Für die Tränkflüssigkeiten PuraDES DecaBAC S und DecaBAC N geeignet.

### Anwendungshinweise

Die trockene Tücherrolle in einen geeigneten Entnahmebehälter stellen und von oben gleichmäßig mit der betreffenden Flüssigkeit langsam übergießen. Das Tuch in der Mitte der Vliesrolle anziehen und von unten durch den Stern im Deckelverschluss fädeln. Danach den Deckel fest auf den Entnahmebehälter drücken und dicht verschließen. Die getränkte Rolle ca. 30 Minuten stehen lassen, bis alle Tücher vollständig gleichmäßig befeuchtet sind. Nur für professionelle Anwender!

Die feuchten Tücher sollten nicht länger als 28 Tage verwendet werden (Standzeit). Haltbarkeitsdatum etc. auf dem Etikett eintragen und auf den Spendereimer kleben. Vor großflächigen Anwendungen auf empfindlichen Materialien (z.B. Kunstleder) erst an einer kleinen Stelle auf Materialverträglichkeit testen. Um Schlierenbildung zu vermeiden, die behandelten Flächen in regelmäßigen Abständen mit Wasser nachwischen. Oberflächen aus Polycarbonat sollten nicht desinfiziert werden. Bei der Anwendung geeignete Handschuhe (z. B. aus Nitrilkautschuk) tragen.

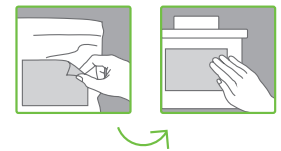

### Erhältlich als

Gebinde	Inhalt	Material	Größe	Art.Nr.	Stück pro Karton
Tücherrolle	150 Tücher	PES/VIS 50 g/m <sup>2</sup>	20 x 30 cm	Pura130	2