



## DecaWIPES DRY

### Lingettes de désinfection sèches

#### Avantages

- Grandes lingettes (20 x 30 cm)
- Pour tous les liquides d'imprégnation PuraDES
- Tissu non tissé ne peluchant pas
- Étiquette Stick & Lift pratique
- 150 lingettes par rouleau
- Qualité 50 g
- Imprégnation simple dans le seau
- Répartition optimale de la solution sur la surface
- Utilisation à une seule main depuis le seau
- Transfert optimal du liquide d'imprégnation dans la lingette

#### Domaines d'application selon le liquide

- Désinfection prophylactique des surfaces de dispositifs médicaux
- Désinfection de petites surfaces


Les lingettes de désinfection PuraDES DecaWIPES DRY sont des lingettes en intissé destinées à désinfecter les surfaces. Imprégnées des détergents PuraDES, elles sont particulièrement adaptées à la désinfection simple et rapide des dispositifs médicaux et des surfaces dans les milieux médicaux. Les lingettes haute qualité non pelucheuses diffusent très bien la solution désinfectante et garantissent un traitement optimal de la surface à désinfecter.

Avec l'étiquette innovante Lift & Stick, vous avez toutes les indications légalement nécessaires (temps d'action, précautions d'emploi etc.) après imprégnation des lingettes sur le seau, en évidence. Adapté aux liquides d'imprégnation PuraDES DecaBAC S et DecaBAC N.

#### Mode d'emploi

Placer le rouleau de lingettes sèches dans un dévidoir distributeur prévu à cet effet, puis verser doucement la solution concernée par le haut de façon uniforme. Tirer sur la lingette au milieu du rouleau et la faire passer, depuis le dessous, par l'ouverture en forme d'étoile du couvercle. Puis appuyer fermement sur le couvercle pour bien le refermer hermétiquement. Laisser reposer le rouleau env. 30 minutes pour une imprégnation uniforme. Réservé aux utilisateurs professionnels !

Les lingettes humides doivent être utilisées dans un délai de 28 jours (durée d'utilisation). Noter la date de péremption etc. sur l'étiquette et la coller sur le seau. Avant toute application sur de grandes surfaces en matériaux sensibles (comme le similicuir), tester d'abord le produit sur une petite zone. Afin d'éviter la formation de stries, rincer régulièrement les surfaces traitées à l'eau claire. Les surfaces en polycarbonate ne doivent pas être désinfectées. Porter des gants adaptés lors de l'application (p. ex. en caoutchouc nitrile).

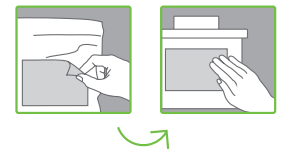

#### Disponible sous forme de

Contenant	Contenu	Matériau	Taille	N° d'art.	Unité par carton
Rouleau de lingettes	150 lingettes	PES/MIS 50 g/m <sup>2</sup>	20 x 30 cm	Pura130	2